

MODALITES DE PRELEVEMENTS
MP 17 - Version 03

1

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Kit PEDICHIFF® stérile contenant :

- ✎ 1 paire de gants à usage unique.
- ✎ 1 paire de pédisacs.
- ✎ 2 paires de pédichiffs.
- ✎ 1 sac zip de suremballage.

2

CONSERVATION DU MATÉRIEL DE PRÉLÈVEMENT

À l'abri de la poussière et à température ambiante.

3

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT

Après avoir franchi le sas et s'être préparé de manière adéquate, pénétrer dans le bâtiment d'élevage et :

- ✎ Enfiler la paire de gants, la paire de pédisacs (couleur transparente) et les 2 paires de pédichiffs (couleur blanche). Le sachet plastique s'ouvre en déchirant la bande supérieure et en tirant sur les languettes blanches au milieu du sachet.
- ✎ Marcher dans le bâtiment d'élevage sur une longueur suffisante (minimum un aller) en privilégiant les endroits riches en fientes cœcales (bords de chaîne d'alimentation et d'abreuvoir) pendant au moins 3 min.
- ✎ Retirer et plier la 1ère paire de pédichiffs dans le bâtiment d'élevage.
- ✎ Introduire la 1ère paire de pédichiffs dans le sachet plastique.
- ✎ Marcher dans le bâtiment d'élevage avec la 2ème paire de pédichiffs sur une longueur suffisante (minimum un retour) en privilégiant les endroits riches en fientes cœcales pendant au moins 3 min.
- ✎ Introduire la 2ème paire de pédichiffs dans le même sachet plastique.
- ✎ Chasser l'air en pressant le sachet, puis fermer le sachet en tirant sur les 2 extrémités.
- ✎ Replier 3 à 4 fois le bord du sachet sur la partie blanche et rabattre les extrémités des languettes sur le sachet.
- ✎ Identifier le prélèvement sur le sachet avec un feutre indélébile.
- ✎ Suremballer le prélèvement dans le sas, avec le sachet zip, pour éviter les contaminations croisées entre élevages.

4

CONDITIONNEMENT ET ACHÈMEMENT DES PRÉLÈVEMENTS AU LABORATOIRE

- ✎ Stockage au frais si la température extérieure est élevée.
- ✎ Dépôt au laboratoire ou expédition dans les meilleurs délais dans un suremballage soigneusement fermé (enveloppe ou glacière).

5

CRITÈRES D'ACCEPTATION DES ÉCHANTILLONS

Délai de réception au laboratoire: 48 h max. (réception avant 14h et mise en analyse le jour même).

Hors analyses réglementaires : le laboratoire réalisera les analyses en émettant des réserves sur les résultats pour les échantillons reçus avec un délai > 96h. Les échantillons reçus plus de 39 jours après le prélèvement ne seront pas analysés

- ✎ Quantité réglementaire minimum: 2 paires de pédichiffs réunis en un seul échantillon
- ✎ Température de transport: température ambiante (rapidement) ou glacière.
- ✎ Intégrité de l'échantillon : échantillons suremballés et identifiés

À RETENIR

1. Marcher sur toute la longueur du bâtiment d'élevage pendant au moins 6 minutes.
2. Protéger le sachet de prélèvement par un suremballage pour le transport au laboratoire.
3. Acheminement au laboratoire dans les meilleurs délais.