

MODALITES DE PRELEVEMENTS
MP 7- Version 05

1

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Kit PEDICHIFF® stérile contenant :

- ✎ 1 paire de gants à usage unique.
- ✎ 1 paire de pédisacs (facultatif).
- ✎ 1 paire de pédichiffs.
- ✎ 1 sachet pour récupérer le prélèvement.

2

CONSERVATION DU MATÉRIEL DE PRÉLÈVEMENT

À l'abri de la poussière et à température ambiante.

3

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT

Après avoir franchi le sas et s'être équipé de la tenue adéquate, pénétrer dans le bâtiment d'élevage, et :

- ✎ Enfiler la paire de gants.
- ✎ Enfiler la paire de pédichiffs.
- ✎ Marcher dans le bâtiment d'élevage de façon à couvrir environ 50 % de la surface du bâtiment. La paire de pédichiffs doit être portée sur toute la longueur du bâtiment en privilégiant les endroits riches en fientes cæcales (bords de chaîne d'alimentation et d'abreuvoir) pendant au moins 3 min.
- ✎ Pour la recherche de *Salmonella* en volaille de chair les 2 paires de pédichiffs doivent couvrir chacune 50 % de la surface du bâtiment, et elles peuvent être remplacées par une seule paire, couvrant 100 % de la surface du bâtiment, et une chiffonnette. Elles sont réunies pour ne constituer qu'un seul échantillon.
- ✎ Retirer et plier la paire de pédichiffs dans le bâtiment d'élevage.
- ✎ Introduire la paire de pédichiffs dans le sachet plastique. Le sachet plastique s'ouvre en déchirant la bande supérieure et en tirant sur les languettes blanches au milieu du sachet.
- ✎ Chasser l'air en pressant le sachet, puis fermer le sachet en tirant sur les 2 extrémités.
- ✎ Replier 3 à 4 fois le bord du sachet sur la partie blanche et rabattre les extrémités des languettes sur le sachet.
- ✎ Identifier le prélèvement sur le sachet avec un feutre indélébile.
- ✎ Il est conseillé de suremballer le prélèvement dans un autre sachet pour éviter les contaminations croisées entre élevages (*ex : sachet zip*).

4

CONDITIONNEMENT ET ACHÈMEMENT DES PRÉLÈVEMENTS AU LABORATOIRE

- ✎ Stockage au frais si l'analyse est différée et que la température extérieure est élevée.
- ✎ Dépôt au laboratoire ou expédition dans les meilleurs délais dans un suremballage soigneusement fermé (enveloppe ou glacière).

5

CRITÈRES D'ACCEPTATION DES ÉCHANTILLONS

- ✎ Délai de réception au laboratoire: 48 h max. (réception avant 14h et mise en analyse le jour même).
- ✎ Quantité réglementaire minimum: une ou deux paires de pédichiffs selon les textes réglementaires
- ✎ Température de transport: température ambiante (rapidement) ou glacière.
- ✎ Intégrité de l'échantillon: échantillon suremballé et identifié.

À RETENIR

1. Les pédichiffs doivent être enfilées dans l'aire de vie des animaux.
2. Marcher sur toute la longueur du bâtiment d'élevage pendant au moins 3 minutes (1 aller-retour).
3. Protéger le sachet de prélèvement par un suremballage pour le transport au laboratoire.